

ULTRAZVUKOVÝ INHALÁTOR

návod na použitie
model: SY308

SK

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a jeho obsluhu.

Používanie: V prípade potreby je možné použiť aj iné zariadenia, ako je napr:



- 01) Vložte batérie alebo pripojte kábel USB. Otvorte veko v hornej časti inhalátora otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- 02) Naplňte inhalačnú tekutinu alebo čistou vodou. Zatvorte veko.
- 03) Nasadte masku alebo náustok.
- 04) Stlačením tlačidla napájania spustíte inhaláciu. Opakovaným stláčaním nastavte 3 úrovne výkonu. Po štvrtom stlačení sa inhalátor vypne.

Obsah balenia:

- 1) Ultrazvukový inhalátor
- 2) Inhalačná maska pre dospelých
- 3) inhalačná maska pre deti
- 4) náustok na inhaláciu ústami
- 5) napájací kábel USB

Technické údaje:

Napájanie:	2 x 1,5 V batérie AA alebo USB DC 5V/2A
Kapacita nádržky:	max. 8 ml
Inhalačná kapacita: 1,5 l:	Teplota inhalačnej
kvapaliny: max. 41 °C	

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo v prípade, že by oprava bola neekonomická. Aby ste mohli výrobok správne zlikvidovať, vyberte ho z

výrobku na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odneste ich na miesta recyklácie batérií.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie
obsluhu, preťaženie, používanie nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, používanie nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra. na iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita. V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.