

Predĺžená seniorská ruka s magnetom **návod na použitie**

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili svojím nákupom. Zakúpením tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojní. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte si ho, prosím, pre budúce použitie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Špecifikácie výrobku: Výrobok je určený na používanie v domácnostiach, v ktorých sa nachádza:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - ľahký odolný materiál | - veľmi kompaktný v zloženom stave |
| - Mäkké konce na uchopenie | - magnet na koncovom uzávere |
| - ergonomicky tvarovaná rukoväť | - 360° otočný hrot |

POUŽITIE:

Vhodný na použitie doma aj v kancelárii. Mechanické rameno predĺži úchop o 80 cm. Gumené hroty zabezpečujú jemné a bezpečné uchopenie. Ergo- nomicky tvarovaná rukoväť. Jedným stlačením prsta uchopíte vybraný predmet. Ak chcete hrotom otáčať, zdvihnite ho a otočte do požadovanej polohy. a zatlačením ho zaistíte späť.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

Kontakt s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po použití výrobok jednoducho utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom mieste.

Ochrana životného prostredia

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo ak by jeho oprava bola nevhodná. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek závalu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok upravili alebo ste nedodrжали pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Ilustrácie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.